



### Аспиратор вакуумный мануальный АВМ - «Вектор».

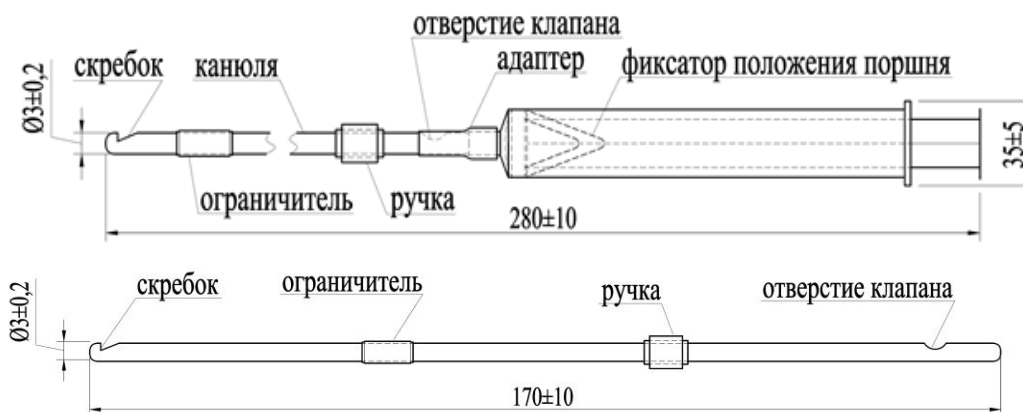


**Назначение.** АВМ предназначен для забора биоматериала из полости матки, в том числе биопсии эндометрия, в объеме, достаточном для проведения исследований и других манипуляций.


**Устройство.** АВМ содержит канюлю (см. рис.), на которой расположены скребок, ограничитель, ручка и отверстие клапана. Канюля соединена подвижно в осевом направлении со шприцом через адаптер. Шприц снабжен фиксатором, установленным на поршне.

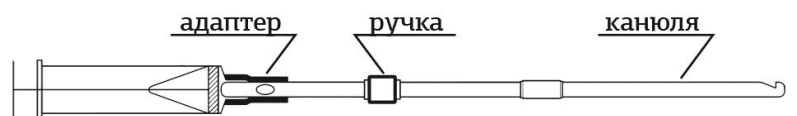

Фиг. 1

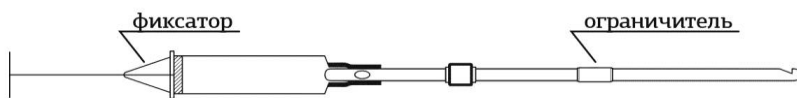

Фиг. 2

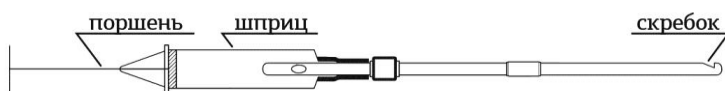

Фиг. 3

**Работа.** Вскрыть пакет в обозначенном месте. • Извлечь шприц. • Извлечь канюлю. • Ввести канюлю скребком наружу в цветной адаптер до упора в поршень – **клапан закрыт** (фиг.1). • Выдвинуть поршень из шприца до упора фиксатора в шприц – **вакуум в шприце** (фиг.2). • Установить ограничитель на глубину введения канюли. • Ввести канюлю в матку скребком к стенке матки. • Ввести канюлю в шприц до упора ручки в адаптер – **вакуум соединился с канюлей** (фиг.3). • Взять пробу вращательным и возвратно-поступательным движением канюли. • Удалить канюлю из матки и биоматериал из канюли и шприца.

**Преимущества.** Наличие скребка • Объем забираемого биоматериала до 10 мл. • Возможность забирать биоматериал, включая биопсию эндометрия, в течение длительного времени без потери вакуума. • Испытания в ведущих клиниках страны показали более 99% положительный результат. • Легкость и безопасность в применении, т.к. вакуум создается до введения канюли в матку. • Возможность использования в амбулаторных условиях. • Разумная цена.

#### Техническое описание

Аспиратор вакуумный мануальный состоит из шприца с фиксатором положения поршня объемом не менее 10 мл., канюли длиной не более 170 мм диаметром рабочей части не более 3 мм. На дистальном конце канюли боковое отверстие выполнено в виде скребка, на противоположном конце канюли имеется отверстие клапана. Длина устройства в сборе не более 280 мм. Изделие одноразовое, стерильное.

**Цена изделия - 395 руб .**

**Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5453 от 06.03.2017.**

**Мы Вам гарантируем:**

- доброжелательное рассмотрение Ваших предложений;
- не менее 80 % срока годности;
- порядочность во взаимоотношениях.

**ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС ПО ЛЮБОМУ ИЗ НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ, ИЛИ В ИНТЕРНЕТ – МАГАЗИНЕ.**

**Адрес:** ЗАО "Вектор" ул. Железнодорожная, д. 94, г. Волгодонск, Ростовская обл., Россия, 347369

**Тел./Факс:** (8639)26-84-96, 26-86-31, 26-86-39. **Моб. тел.:** +79281759874 (Viber); +79614094191; +79889515021(WhatsApp); +79515301189. **Skype:** vektordon, vektordon1, vektordon2, vektordon3.

**Эл. почта:** [vektor@vektor-med.ru](mailto:vektor@vektor-med.ru)

**Веб-сайт:** [www.vektor-med.ru](http://www.vektor-med.ru)\* [vektor-med.рф](http://vektor-med.рф)