


Устройство для внутриматочной биопсии УВБ - «Вектор»
Более чем в 2100 лечебных учреждениях России успешно применяется это изделие.

ЗАО «Вектор» предлагает одноразовое полимерное устройство, позволяющее быстро и безболезненно получать информативный материал из полости матки для цитологического и гистологического исследований.

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2010/06872 от 01.03.2010
г.

Патент на изобретение
№ 2250078

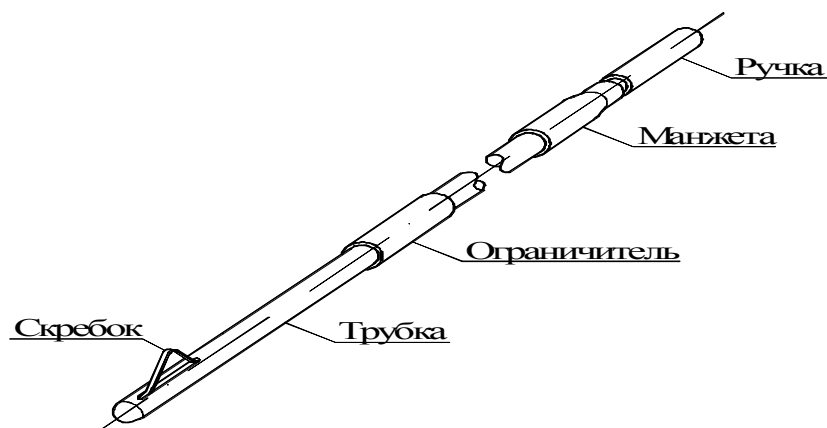

Краткое описание устройства.

Устройство для внутриматочной биопсии (далее устройство) состоит из трубки диаметром 3 мм и длиной 265 мм, имеющей боковое отверстие на дистальном конце, и штока с ручкой. Шток размещается внутри трубки. На дистальном конце штока, расположенном в полости дистального конца трубки, имеется эластичный скребок с возможностью его выхода за контуры трубки через боковое отверстие. Торец дистального конца трубки имеет сферическую атравматичную форму, а на противоположном ее конце находится уплотняющее устройство (манжета). На трубке расположен ограничитель.

Работа устройства.

В исходном (транспортном) положении шток слегка выдвинут из трубки - при этом скребок находится внутри трубки напротив бокового отверстия. Ограничитель устанавливается на нужную глубину введения устройства в полость матки, и устройство за трубку вводится в матку до ограничителя. Удерживая трубку, шток подается вперед до упора – при этом скребок через боковое отверстие в трубке выходит наружу. Вращением устройства скребком отделяется от стенок матки биоматериал, который засасывается через боковое отверстие трубки внутрь при выдвигании штока, после чего устройство с биоматериалом удаляется из полости матки. Скребок при выдвигании штока возвращается внутрь трубки.

Преимущества устройства.

Наличие скребка обеспечивает при вращении устройства системную биопсию эндометрия и представительность пробы.

Расположение скребка внутри трубки при прохождении цервикального канала, сферическая поверхность дистального конца трубки и ее небольшой диаметр позволяют безболезненно вводить устройство в полость матки в амбулаторных условиях.

Уплотнение на проксимальном конце трубки позволяет увеличить количество забираемого биоматериала за счет исключения подсоса воздуха.

При необходимости устройство может использоваться для аспирации содержимого матки без биопсии.

Цена изделия – 158 руб.

Мы Вам гарантируем:

- доброжелательное рассмотрение Ваших предложений;
- не менее 80 % срока годности;
- порядочность во взаимоотношениях.

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС ПО ЛЮБОМУ ИЗ НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ, ИЛИ В ИНТЕРНЕТ – МАГАЗИНЕ.

Адрес: ЗАО "Вектор" ул. Железнодорожная, д. 94, г. Волгодонск, Ростовская обл., Россия, 347369
Тел./Факс: (8639)26-84-96, 26-86-31, 26-86-39. **Моб. тел.:** +79281759874 (Viber); +79614094191;
+79889515021(WhatsApp); +79515301189. **Skype:** vektordon, vektordon1, vektordon2, vektordon3.
Эл. почта: vektor@vektor-med.ru
Веб-сайт: www.vektor-med.ru* vektor-med.ru или [КЛИКНИТЕ ЗДЕСЬ!](#)